



Medi More


FOR LOUPE




才腕も“くもらせない”

『メディモア フォー ルーペ』は手術中等での使用時、  
呼吸もしくは汗によるルーペレンズのくもりを防止するフィルムです。

モスアイ構造 100~200nmサイズのナノ凹凸表面構造を工業的に作り出す構造です。

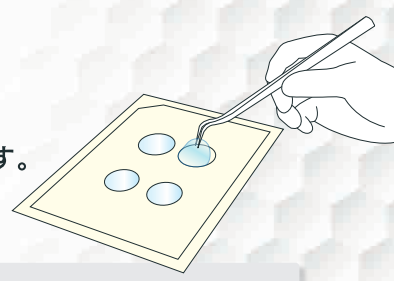


### くもり防止機能

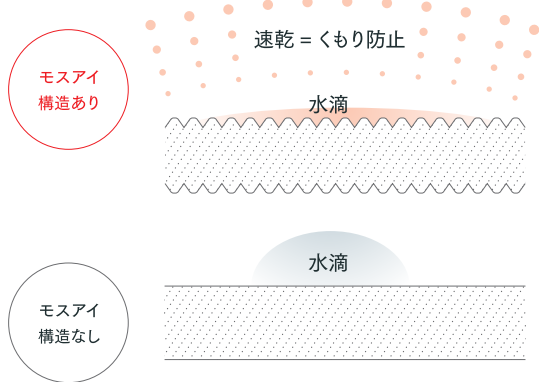

モスアイ構造により、水滴が広がり、  
表面積が増えることで  
速乾性に優れ、くもりが防止できます。

### 低反射機能・高透過フィルム

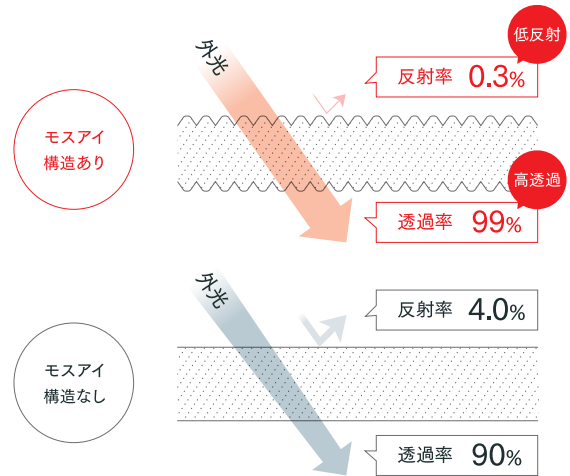

微細な凹凸により屈折率を連続的に変化させることで  
反射率を軽減しています。  
透明度に優れたポリカーボネイトを使用し  
色付きも少ない、クリアな視界を確保しています。

#### 製品仕様

【型名】 Medi More for Loupe 【外形寸法】 ○接眼フィルムレンズ: φ21mm ○対物フィルムレンズ: φ23mm

【材質】 ○フィルムレンズ:ポリカーボネイト ○粘着剤:アクリル系樹脂

※ お手持ちのサージカルルーペに適合しない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

#### 販売価格

【販売価格】 1箱 / 12,000円(税込13,200円) JANコード:4571552800012

【梱包内容】 レンズ用フィルム 4枚(接眼レンズ用 2枚、対物レンズ用 2枚)、取付用ピンセット1本

※お買い求めの際は、お近くの医療機器販売業社様にお問い合わせください。

#### 安全上の注意

- フィルムの端面で手や顔などを傷つけないよう、取扱には十分注意を払ってください。
- フィルムが汚れた状態、もしくは破損した状態では使用しないでください。
- 取扱説明書に記載された内容にしたがい、フィルムとフレームを正しく取り付けてください。
- ベンジン、シンナー、灯油、酸性洗剤、アルカリ性洗剤などで清掃しないでください。
- 本品の脱落による危険性が高い場所では使用しないでください。
- 本体、付属品を、絶対に分解、改造はしないでください。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。

#### 使用上の注意

- 有害な粉塵やガス等が発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
- 装着していて気分が悪くなった場合は使用を中断してください。
- レンズの汚れが落ちない場合、またはルーペ筐体から剥がれがあった場合は、使用を止めて新品のものを取り付けてください。
- 乳幼児の手が届かないところで保管してください。
- 火気の近くで使用・保管はしないでください。
- 本製品は、高温多湿や、直射日光が当たるような場所を避けて保管してください。
- 本品破棄の際は、地方自治体の条例に従い廃棄してください。

【販売元】 株式会社メディビート

〒683-8503 鳥取県米子市西町86番地  
TEL:0859-36-6161 FAX:0859-36-6162  
E-mail:info@medibeat-inc.co.jp

【製造元】 シャープ米子株式会社

〒689-3524  
鳥取県米子市石州府字大塚ノ武650番  
TEL:0859-27-5111

お問い合わせ先

